

「にがりチェッカーCaLighD(キャライド)」のアプリ仕様変更のご案内

「にがりチェッカーCaLighD(キャライド)」の専用アプリ、「MP チェッカー」の仕様が変更になります。現在 MP チェッカーをご利用のお客様におかれましては、自動でアップデートが行われます。変更内容は以下のとおりです。ご理解賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

【変更内容】(※次項のアプリ画面をご参照ください)

1) 測定結果を「にがりレベル」で表示(10 が最大値)

現行の表示では、数字と 5 段階評価の組み合わせでしたが、測定タイミングによっては、数値が高いのにA評価(空腹時より値は高いが、食後としては基準値内)であるなど、解釈が複雑であるとの指摘がありました。

また、5 段階のリスクレベルのイメージがつかみにくいとの声も頂いております。

そこで、測定値は 10 段階、リスクレベルが 5 段階(5 種類のイラスト)としました。

測定結果で表示されたイラストが、「将来の自分」というイメージを持ちやすくするために、改善させていただきました。

2) 各画面の修正

測定結果表示の変更に合わせて、測定画面と、履歴(グラフ)画面の修正を行いました。測定履歴はグラフ画面で表示。グラフ画面をピンチ(2本の指で、タッチスクリーンを、つまむように操作すること)することで、日内変動から日時推移、週次推移と、期間を変えて推移を確認することができます。

【変更(自動アップデート)時期】

2020年8月28日(金)

これまで MP チェッカーをご利用のお客様におかれましては、自動でアップデートが行われます。なお、新規にダウンロードされるお客様は、以下のリンクからダウンロードしてご利用くださいませ。

【お問合せ先】

info@med-photo.co.jp

■専用アプリ「MP チェッカー」


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.med_photo.Mpchecker



(従来)測定結果画面




(新)測定結果画面

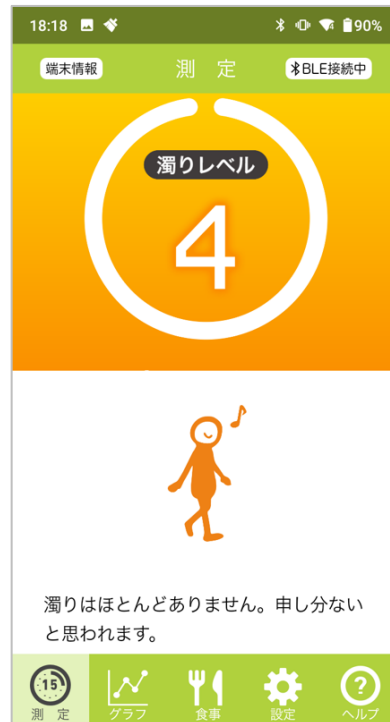

(新)測定結果画面2



(新)グラフ画面(1日の変動)

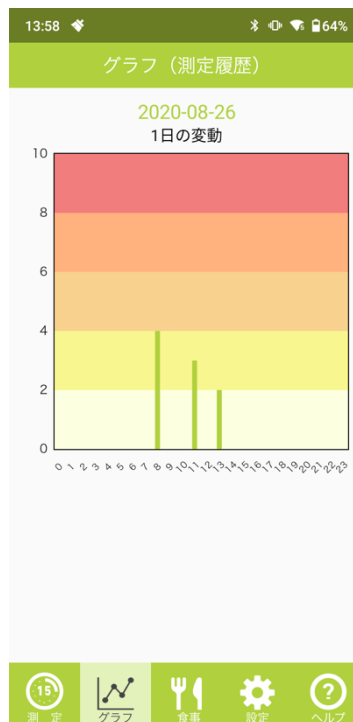

(新)グラフ画面(日時推移)

